

# WARTUNGSUMFANG LIAISON® MDX



Durchschnittlicher Arbeitsaufwand 3 bis 5 Stunden (5 Stunden, falls die Betriebsdauer des Heizelementes ihr Limit erreicht hat und getauscht werden muss).



Im Rahmen unserer Wartungs- und Serviceverträge sind die Arbeits- und Reisezeiten innerhalb regulärer Arbeitszeiten (Mo. bis Fr. von 9 bis 17 Uhr mit Ausnahme von Feiertagen) inkludiert.



Zur Beauftragung einer Wartung außerhalb unserer Wartungs- und Serviceverträge fordern Sie bitte zunächst einen Kostenvoranschlag bei uns an – E-Mail: [service\\_de@diasorin.com](mailto:service_de@diasorin.com).



Für die regelmäßigen Wartungen im Rahmen unserer vertraglichen Servicevereinbarungen kommt unser Dispatch-Team zwecks Terminvereinbarung auf Sie zu.



## 1 Reinigung, Dekontamination und Lampenprüfung

- Reinigung und Dekontamination des Systems
- Lampe erneuern (falls erforderlich)
- Tausch des Heizelementes für die Denaturierungsphase (falls erforderlich)
- Reinigung und Dekontamination des Analyzers

## 2 Lokales Backup

- Erstellen eines lokalen Datenbackups zur Sicherung der Systemdaten

## 3 Deckelverriegelung

- Überprüfung und ggf. Justierung des Deckels inkl. Spaltmaßjustierung
- Kontrolle und Funktionsprüfung des Schließmechanismus

## 4 Spektralmatrixzertifikat

- Durchführung des Testlaufs mit einem entsprechenden Kalibrationskit (SC1100 Assay)
- Generierung der neuen Spektralmatrix sowie Integration in die User-Software

## 5 Motorzähleranalyse

- Kontrolle der relevanten Verschleißparameter am Hauptmotor durch den Techniker inkl. Funktionskontrolle durch die Service-Software

## 6 Revisionsprüfung von Handbüchern

- Überprüfung und ggf. Aktualisierung
  - der Geräte-SW-Version
  - der Geräte und User-Manuals, welche dem Kunden zur Verfügung stehen



## ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DEN LIAISON® MDX:

Scannen oder klicken Sie auf den QR-Code und Sie erhalten weitere Informationen.

<https://dsd-home.diasorin.de/analysegeraete/liaison-mdx>

